

Attends®

Vaše inkontinenční ochrana




CONTOURS

Attends Contours je řada anatomicky tvarovaných vložek určených ke zvládnání středně těžké až těžké inkontinence moči a/nebo stolice. Používají se s fixačními kalhotkami (Contours 6-10). Contours 4-5 lze nosit s přiléhavým spodním prádlem.




Nasazení

Pro co nejlepší přizpůsobení doporučujeme s tvarovanými vložkami Attends (Contours Regular a Air Comfort 6 - 10) používat fixační kalhotky Attends. Důležitá je správná velikost fixačních kalhotek.

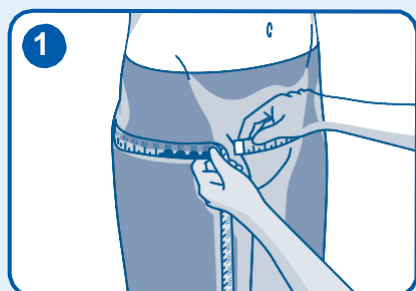


1 Změřte boky a pas. Větší z těchto dvou rozměrů určuje správnou velikost fixačních kalhotek.

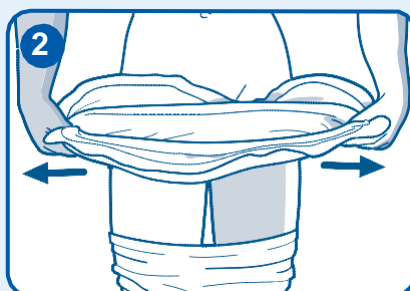


2 Navlékněte si fixační kalhotky, poté si je stáhněte těsně nad kolena a pas přehněte. Rozbalte vložku, zadní strana musí být směrem ven. Výrobek lehce přeložte a podélně vytvarujte, aby se napřímily ochranné bariéry.




3 Umístěte vložku mezi stehna. Pokud je to možné, vložte ji zepředu dozadu a větší částí směrem k hýždím.

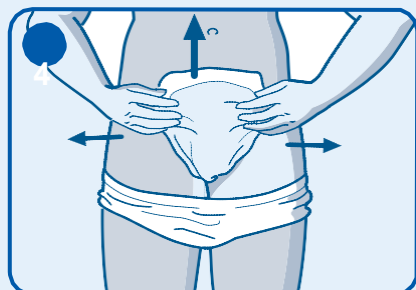

Vložku vyhladte a fixační kalhotky si natáhněte na hýždě tak, aby Vám příjemně seděly.

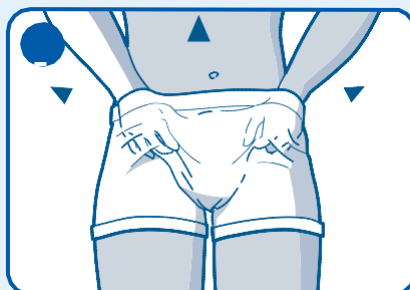

Fixační kalhotky si nasadte tak, aby zakryly vložku a zkontrolujte, zda není zadní strana přeložená směrem dovnitř.

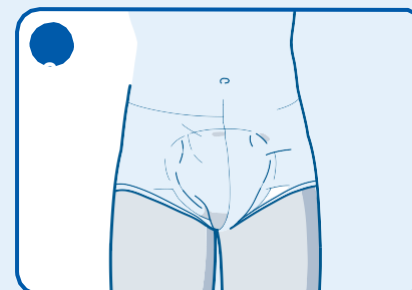

Fixační kalhotky musí překrývat vložku. Na závěr zkontrolujte, zda vložka i fixační kalhotky dobře sedí.

Více informací naleznete na www.attends.cz

CONTOURS

Rady a tipy

Výběr

- Absorpční schopnost zvolte podle objemu uniklé moči. Nejprve zvolte nižší savost a teprve poté přejděte na vyšší savost.
- Velikost fixačních kalhotek vyberte podle velikosti boků a pasu uživatele – vybírejte podle většího z těchto rozměrů.
- Attends Contours Regular a Air Comfort 4 a 5 lze nosit s přiléhavým spodním prádlem.

Nasazení

- Před nasazením vložky ji úplně rozevřete.
- Vložku podélně přeložte a jemně prohněte do miskovitého tvaru.
- Umístěte menší konec vložky na přední straně a větší konec na zadní straně těla.
- Umístěte vložku u mužů směrem dopředu a u žen doprostřed.
- Zkontrolujte, zda používáte správnou velikost fixačních kalhotek, nebo jejich odpovídající ekvivalent.
- Pokud nasazujete vložku ležícímu klientovi, postupujte stejným způsobem, jako u stojícího klienta.



Kožní snášenlivost je dermatologicky testována a schválena institutem SGS proderm pro aplikovaný dermatologický výzkum.

Výměna

- Zkontrolujte indikátor vlhkosti - pokud indikátor vlhkosti není vidět ve více než polovině délky vložky (60 %) nebo pokud vložka obsahuje stolici, je třeba ji vyměnit. V opačném případě lze vložku nadále ponechat.
- Čisté a suché vložky lze znovu použít i po použití toalety.
- Pokud je to možné, vyjměte znečištěnou vložku zezadu.
- Pokožku očistěte podle vašich doporučených postupů. Čistěte zepředu směrem dozadu.
- Používejte pouze předepsané krémy a aplikujte je podle pokynů výrobce.

Únik

- Zkontrolujte správné nasazení a výběr vložky.
- Zkontrolujte správnou velikost fixačních kalhotek.

Likvidace

- Vložku srolujte a zlikvidujte v souladu s místními předpisy nebo předpisy NHS pro nakládání s odpady.
- Nesplachujte vložky do záchodu.
- Fixační kalhotky Attends jsou určeny pro opakované použití.