

Attends®

Vaše spolehlivá ochrana při inkontinenci




SOFT 0 to 7


Attends Soft je řada diskrétních absorpčních vložek pro citlivou pokožku, které lze nosit v běžném spodním prádle. Jsou určeny pro zvládnání velmi lehké až těžké močové inkontinence.




Návod k použití

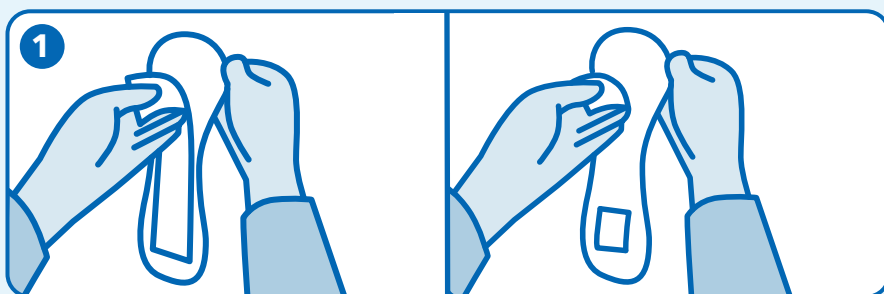


Jeden lepicí pásek (platí pro Soft 0 až 4). Odstraňte krycí papír z lepicího pásku na zadní straně vložky.

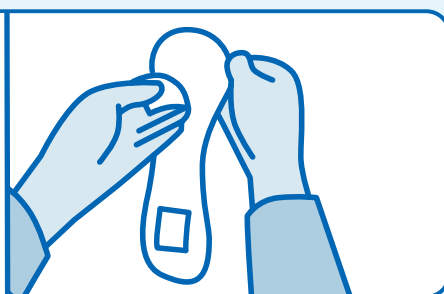

Dvoudílný lepicí pásek (platí pro Soft 5 až 7). Odstraňte krycí papír z lepicích pásků na zadní straně vložky.

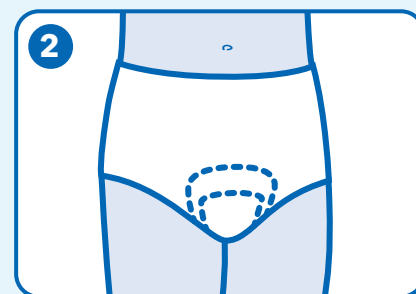

Umístěte vložku do vašeho přiléhavého spodního prádla.

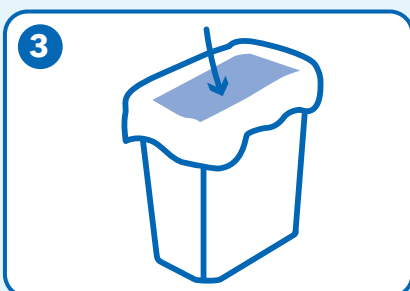

Po použití použité vložky srolujte a zlikvidujte jako běžný odpad.

SOFT 0 to 7

Rady a tipy

Výběr

- Zvolte správnou velikost vložky s vhodnou absorpční schopností podle vašich potřeb.
- Pro optimální ochranu doporučujeme nosit vložku společně s přiléhavým spodním prádlem.
- Výběrem co nejmenší možné velikosti a absorpční schopnosti si zajistíte větší soukromí a snížíte množství odpadu.

Likvidace

- Vložku srolujte a zlikvidujte podle vašich postupů pro likvidaci odpadů.
- K likvidaci můžete použít vnitřní obal vložky, pokud je k dispozici.
- Nesplachujte vložku do toalety.



Koží snášenlivost je dermatologicky testována a schválena Institutem proderm pro aplikovaný dermatologický výzkum